

Corsé Bivalvo



El apoyo externo puede regularse en altura y en profundidad doblando la pletina anterior, lo que nos permitirá ajustarlo adecuadamente según las características físicas de cada paciente.

Ref.: **CT1001 HOMBRE**

Ref.: **CT1002 MUJER**

CORSÉ BIVALVO

Características:

Corsé toraco-lumbosacro fabricado en polietileno de baja densidad de 4 mm y forrado con un material textil almohadado, que se puede desmontar con facilidad permitiendo el lavado y consiguiendo así una correcta higiene de la ortesis a la vez que protege al paciente de posibles rozaduras. En la parte anterior está situado un apoyo pectoral regulable en altura, que nos permite conseguir una extensión completa de la columna dorsal. El polietileno, al ser un material termoconformable, nos permite realizar ajustes sobre el corsé aplicando calor (antes de aplicar calor es necesario desmontar el forro textil). El plano anterior se sitúa desde el esternón hasta la sínfisis pubiana. El plano posterior se sitúa desde el tercio medio escapular hasta la mitad de la región glútea.

El corsé bivalvo de Orliman se presenta con 15° de lordosis lumbar. Se cierra mediante un sistema de velcros situados en los laterales del corsé y en el apoyo externo.

El apoyo externo puede regularse en altura y en profundidad doblando la pletina anterior, lo que nos permitirá ajustarlo adecuadamente según las características físicas de cada paciente. Por su diseño, ofrece como una de sus principales ventajas el facilitar la colocación en pacientes encamados.

Efectos:

El corsé bivalvo con apoyo externo nos permite una perfecta inmovilización de la columna toraco-lumbosacra gracias a sus valvas envolventes ajustadas mediante un sistema de velcros, manteniendo la columna en extensión completa, evitando giros laterales y movimientos de rotación.


Indicaciones:

- Patologías que requieran una inmovilización de la zona dorsolumbar como los procesos preoperatorios y postoperatorios de columna.
- Fracturas vertebrales.
- Hernia discal.
- Osteoporosis.
- Espondilolisis, espondilolistesis, espondiloartrosis, escoliosis dolorosa en adultos, etc.
- Rotura de ligamentos o hiperlaxitud de los mismos.
- Neoplasias que produzcan procesos degenerativos de la columna.
- Cifosis torácica en región media hasta inferior de la columna dorsal.
- Prevención de estenosis de canal en pacientes encamados.

Color:

- Gris.

HOMBRE	CADERA	CINTURA	CONTORNO BAJO PECHO
1	71-81	51-71	66-78
2	81-91	71-81	78-90
3	91-101	81-91	90-102
4	101-114	91-101	102-114
5	114-127	101-114	114-128

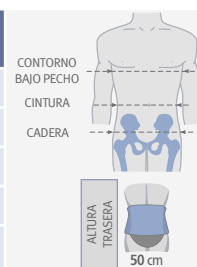

MUJER	CADERA	CINTURA	CONTORNO BAJO PECHO
1	71-81	46-56	58-68
2	81-91	56-66	68-78
3	91-101	66-76	78-88
4	101-114	76-86	88-98
5	114-127	86-96	98-108

