

# Rodetes Rotulianos



## Ref.: RR-ML-Negro NE

## Ref.: RR-ML-Negro SIL

## Ref.: RR-ML-Negro

### RODETE MEDIA LUNA NEOPRENO

### RODETE MEDIA LUNA SILICONA


### RODETE ROTULIANO NEOPRENO

#### Características:

La función de los rodetes circulares es el centraje rotuliano. La función de los rodetes media-luna es el centraje y la estabilización de la rótula cuando está tiende a desplazarse medial o lateralmente, o hacia arriba o hacia abajo. Estos rodetes son adaptables a las rodilleras de la familia Thermo-med.

#### Colocación:

El rodete cuenta con un velcro de microgancho que se adapta pegándolo en la cara interna de la ortesis haciéndola coincidir con la ventana rotuliana, situándola según la función deseada.

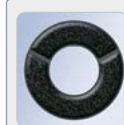

El modelo Rodete rotuliano de neopreno circular puede cortarse por las marcas y usarse como rodete de medialuna para desplazamientos medial o lateral.