



Ref.: **OPR110**

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS INFANTILES (6-9 AÑOS)
3 CAPAS TIPO IIR

CARACTERÍSTICAS COMUNES



talla universal

uso único

desechables

Características:

- Confeccionadas en tejido no tejido de alta calidad de 3 CAPAS: spunbond-meltblown-spunbond.
- 3 pliegues nasales para un adecuado ajuste facial.
- Alta eficacia a la filtración bacteriana (EFB) % $\geq 99,5\%$.
- Presión diferencial (Pa/cm²) (Resistencia a la respiración) < 60 .
- Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) ≥ 16 .
- Limpieza microbiana (ufc/g) ≤ 30 .
- Minimiza el riesgo de alergias: libre de látex, carente de fibras de vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes.
- Gomas de sujeción confortables y suaves para minimizar el roce.
- Clip nasal moldeable.
- De un solo uso.

Indicaciones:

- Reducir el riesgo de propagación de infecciones, particularmente en situaciones epidémicas o pandémicas, para pacientes y otras personas que las lleven puestas (en el sentido de la exhalación). No proporciona un nivel fiable de protección frente a la inhalación de partículas. Reducción de la emisión de agentes infecciosos hacia afuera, desde la nariz y la boca de un portador asintomático o de un paciente con síntomas clínicos, gracias a la barrera microbiana..

Instrucciones de uso:

- Los puntos de inserción de las tiras elásticas quedan hacia el interior, de modo que se identifica fácilmente la cara interna (la parte que está en contacto con la cara) de la cara externa de la mascarilla. En la parte superior lleva una banda nasal moldeable, que mejora la adaptabilidad alrededor del contorno del puente nasal del usuario.

Advertencias:

- Estas mascarillas son de un solo uso, y no son reutilizables. Deseche la mascarilla después de su uso y reemplace en caso de llevarla durante un periodo largo de tiempo o al cambiar de actividad. Para el desecho de la mascarilla y de su envase, cumpla estrictamente con las normas legales de su comunidad y en caso de contaminación biológica con residuos biológicos como sangre, fluidos biológicos, etc., deposite la mascarilla en un contenedor apropiado. Desinfectese las manos después de haberla desechado.

Color:

- Blanco.


TALLA UNIVERSAL



CAPACIDAD DE FILTRADO BFE $\geq 99,5\%$

HOMOLOGADAS SEGÚN NORMA: UNE-EN:14683:2019+AC

Ensayo realizado AITEX

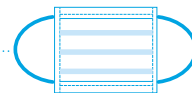

Las mascarillas quirúrgicas Actius by Orliman son productos sanitarios clase I; (con licencia AEMPS: 20-PS)



Coloca la cinta detrás de las orejas



Cubre la boca y la nariz adecuadamente



Presiona la tira metálica para ajustar a la nariz