



Ref: UF100



RODILLERA MULTIFUNCIONAL DE ESTABILIZACIÓN

Características:

Confeccionada en materiales flexibles y transpirables, proporcionando una gran comodidad.
Su diseño envolvente (abertura total) facilita la colocación y permite una perfecta adaptación a la morfología del paciente.

Indicaciones:

- Tratamiento postquirúrgico de rodilla.
- Rehabilitación después de las lesiones.

Color:

- Negro.

| TALLAS | PERÍMETRO CM | |
|--------|--------------|--|
| 1 | 39-47 | |
| 2 | 47-53 | |
| 3 | 53-60 | |
| 4 | 60-67 | |
| 5 | 67-75 | |

DIFERENTES OPCIONES DE COLOCACIÓN EN FUNCIÓN DE LA LESIÓN



LIGAMENTOS COLATERALES

Esguince / Inestabilidad.
La colocación posterior aporta una estabilidad ligamentaria.



LIGAMENTOS CRUZADOS

Reanudación de la actividad.
La colocación anterior refuerza y sujeta los ligamentos.



RÓTULA

Tras luxación / subluxación.
El vendaje en el lado de la rótula impide que ésta se desplace.



TENDÓN ROTULIANO

Tendinitis.
La colocación bajo la rótula permite que el tendón descanse.



TENDÓN DE LA FASCIA LATA

Tendinitis.
La colocación en la parte externa de la rodilla ayuda a descansar el tendón.